

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 20:06

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/inobelle-d-1-x-1-ml-srednio-gesty-usieciowany-kwas-hialuronowy-p-16156.html>

Inobelle D 1 x 1 ml Średnio - gęsty usieciowany kwas hialuronowy



Cena	145,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1386
Kod EAN	2000000176451
Producent	Inni producenci
Opis	Inobelle D 1 x 1 ml Średnio-gęsty usieciowany kwas hialuronowy

Opis produktu

Inobelle D 1 x 1 ml Średnio- gęsty usieciowany kwas hialuronowy

UWAGA! Produkt ważny do 25.11.2023r

Wypełniacz na bazie sieciowanego kwasu hialuronowego INOBELLE D



Wskazania:

- Średniogłębokie i głębokie zmarszczki
- Bruzdy nosowo- wargowe
- Linie marionetki
- Czoło

Opakowanie:

1 strzykawka 1ml
2 igły: 27G i 29G

Głębokość iniekcji:

Środkowa warstwa skóry właściwej

Kwas hialuronowy użyty w produkcie pozyskiwany jest z biofermentacji bakteryjnej i jest całkowicie biokompatybilny, nietoksyczny, nieimmunizujący, wchłaniany



- Udowodniona skuteczność i bezpieczeństwo (CE, KFDA)
- Wysoka lepkość 2 7000,000 cP
- Łatwa iniekcja (siła nacisku tłoka 10N)
- Zaawansowana technologia i proces produkcji
- Gęstość HA: 20mg
- Dwustopniowy proces oczyszczania (endotoksyny, proteiny poniżej progu detekcji)
- LTSR (Long- Term Safety Review)
- Data ważności: 3 lata
- Przechowywanie: 1-30°C

Technologia produkcji Low Temperature Stabilization Reaction LTSR

Inobelle są produkowane w technologii LTSR, w wyniku której dystans pomiędzy molekułami HA jest zminimalizowany. Dzięki procesowi LTSR produkowany żel kwasu hialuronowego o wysokiej gęstości i precyzyjnie ułożonej strukturze molekularnej. Inobelle charakteryzuje wysoka sprężystość i odporność na enzymatyczny rozkład.

Te cechy sprawiają, że:

- doskonale poddaje się modelowaniu i precyzyjnie układa się w tkankach
- odczucia dyskomfortu w trakcie podawania są delikatne
- efekt zabiegu utrzymuje się długo

W badaniu satysfakcji zarówno lekarza jak i pacjenta Inobelle otrzymał najwyższe noty.

Stosunek zawartości żelu do HA

Parametry wypełniacza HA Wydajność kliniczna

Stosunek żelu do płynu
Stężenie żelu HA ↑ → Trwałość

	Produkt H	Produkt R	Produkt J	Inobelle ⁺
Całkowite stężenie HA (mg/ml)	5,5	20	24	20
Stosunek żelu do płynu	98:2	75:25	60:40	85:15
Stężenie HA żelu (mg/ml)	5,4	15,0	14,4	17,0

Stosunek żelu w produkcie H (98) > Inobelle (85) > Produkt R (75) > Produkt J (60)

Koncentracja żelu HA: Inobelle (17) > Produkt R (15,0) > Produkt J (14,4) > Produkt H (5,4)

Na długość utrzymywania się produktu HA w tkankach ma stosunek zawartości żelu do postaci płynnej HA, który w Inobelle⁺ wynosi:
Postać płynna - rozpuszczalna HA 15%
Postać żelowa - nierozpuszczalna HA 85%

Wysoka lepkość



Inobelle⁺ V


Inobelle⁺ Facial Filler

120 minut później



Inobelle⁺ V


Inobelle⁺ Facial Filler

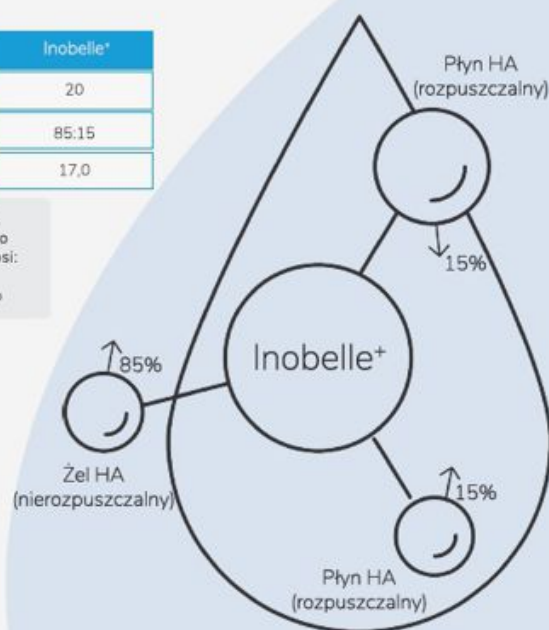

2 stopniowy proces oczyszczania

Inobelle jest oczyszczany w procesie 2 stopniowego bezpośredniego płukania wodą żelu w buforze. Dzięki temu skuteczność oczyszczanej powierzchni podnosi się i tym samym zwiększa się oczyszczanie z BDDE i produktów ubocznych powstających w tym czasie w żelu w trakcie osmozy. Po pierwszym etapie oczyszczania żel jest napęczniały, co zwiększa jego powierzchnię.

W drugim etapie dochodzi do oczyszczania żelu z resztkowego BDDE i produktów ubocznych powstających wewnątrz żelu w trakcie przechodzenia przez sito i zmianie struktury do małych kropli kwasu hialuronowego. Finalnie powstaje czysty i bezpieczny produkt pozbawiony BDDE resztkowego i produktów ubocznych.

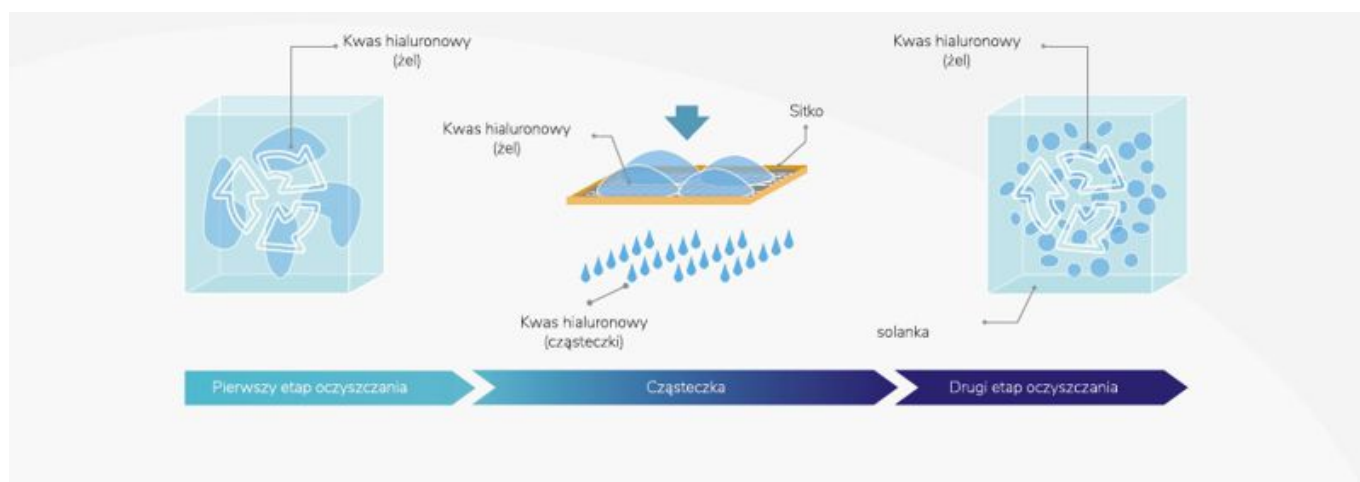

Specyfikacja

Inobelle ⁺ z lidokainą	Inobelle ⁺ F	Inobelle ⁺ D	Inobelle ⁺ S	Inobelle ⁺ N
Inobelle ⁺ bez lidokainy	Inobelle F	Inobelle D	Inobelle S	-
Skład	Usieciowany kwas hialuronowy (20mg/ml)	Usieciowany kwas hialuronowy (20mg/ml)	Usieciowany kwas hialuronowy (20mg/ml)	Usieciowany kwas hialuronowy (20mg/ml)
Wielkość cząsteczki	Mala (200 µm)	Średnia (500 µm)	Duża (1100 µm)	Średnia (500 µm)
Lepkość	2,7000,000cP	2,7000,000cP	2,7000,000cP	2,7000,000cP
Wskazania	Drobne powierzchniowe zmarszczki	Wypełnienie zmarszczek (linie zmarszczki, kurze łapki, bruzdy nosowo-wargowe)	Korekcja głębokich zmarszczek (wolumetria policzków, czoło)	Mostek nosowy podbródek
Głębokość iniekcji	Płytko śródskórnio	Środkowe warstwy skóry właściwej	Głębokie warstwy skóry właściwej	Środkowe warstwy skóry właściwej
Siła iniekcji	10N	10N	10N	10N
Pojemność (igła)	1ml (27G, 30G)	1ml (27G, 30G)	1ml (27G, 30G)	1ml (27G, 30G)
Przyczepność (N)	0,5	0,5	0,5	0,5
Przechowywanie	Przechowywanie w temperaturze pokojowej (1-30 stopni C). Z dala od słońca.			
Data ważności	36 miesięcy			

UWAGA! Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy oraz specjalistów medycyny estetycznej.

[Sprawdź kosmetyki profesjonalne uzupełniające zabiegi, kosmeceutyki po zabiegu.](#)