

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/velox-top-af-spray-1000ml-neutralny-zapach-p-11787.html>



Velox Top AF Spray 1000ml Neutralny zapach

Cena	32,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MS 002-001
Kod EAN	5907626634082
Producent	Medi - Sept

Opis produktu

Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych takich jak: łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, wózki do przewożenia chorych, aparatura medyczna i operacyjna.

Cechy produktu:

Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni

Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe – opinia Famed

Działa już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Rota

Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, unitów, blatów, szafek pacjenta, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów, wycisków silikonowych, łyżek protetycznych, protez i wycisków

Sposób użycia: Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie, a następnie przetrzeć jednorazowym ręcznikiem. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu (np. szkło akrylowe). Wyrób przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.

Skład: 100 g zawiera:

40g – propan-2-ol (CAS:67-63-0)

20g – etanol

0,39g – aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

0,25g – chlorek didecyldimetyloamoniowy

Opakowanie:

butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

Zastosowanie: Velox® Top AF zalecany jest do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka nr 57/DKJ/2015.