

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/viruton-strong-1000ml-p-11788.html>



Viruton Strong 1000ml

Cena	109,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MS 003-001
Kod EAN	5907626632279
Producent	Medi - Sept
Opis	Viruton Strong 1000ml

Opis produktu

Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Cechy produktu:

Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885).
Wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera aldehydów).
Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, spory.
Wyjątkowe właściwości myjące.
Najniższe stężenie roztworu roboczego.
Łatwy w dozowaniu dzięki zintegrowanej miarce.

Korzyści dla użytkownika:

Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów.
Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne.
Bardzo ekonomiczny w użyciu.
Szybkość i wygoda w sporządzaniu roztworu.

Zastosowanie:

Viruton Strong to wysoce skuteczny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju termolabilnych i termostabilnych instrumentów chirurgicznych (za wyjątkiem endoskopów giętkich). Nowoczesna formuła gwarantuje doskonałe efekty czyszczące nawet przy wysokim obciążeniu białkowym w krótkim czasie działania. Viruton Strong posiada szerokie spektrum bójcze w bardzo niskich stężeniach użytkowych. Zastosowanie inhibitorów korozji gwarantuje wysoką tolerancję materiałową instrumentarium oraz wyrobów medycznych i przyrządów laboratoryjnych ze szkła, porcelany, metalu, gumy i tworzyw sztucznych. Roztwór preparatu posiada przyjemny zapach. Aktywność nieużywanego oraz używanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Może być stosowany w myjce ultradźwiękowej.

Skuteczność mikrobiologiczna:

Bakterie (w tym MRSA, Legionella, Klebsiella) wg norm: EN 1040: 0,25% - 5 min., EN 13727: 0,5% - 5 min., 0,25% - 15 min., EN 14561: 1% - 5 min., 0,5% - 15 min., 0,25% - 30 min.
Grzyby i drożdżaki wg norm: EN 1275: 0,25 % - 15 min., EN 13624: 0,5 % - 5 min., 0,25% - 15 min., EN 14562: 1% - 5 min., 0,5% - 15 min., 0,25% - 30 min.
Prątki gruźlicy (M. terrar, M. avium) wg norm: EN 14348: 1,5% - 5 min., 0,5% - 15 min., 0,25% - 30 min., EN 14563: 2% - 5 min., 1% - 15 min., 0,5% - 30 min., 0,25% - 60 min.
Wirus Vaccinia wg normy: EN 14476+A1: 0,25% - 15 min.
Wirus BVDV, HCV wg normy: EN 14476: 0,25% - 5 min.
Wirus Adeno wg normy: EN 14476+A1: 1,5% - 5 min., 0,5% - 15 min., 0,25% - 30 min.
Wirus Polio wg normy: EN 14476+A1: 1% - 15 min., 0,25% - 30 min.
Spory wg normy: EN 14347: 0,5% - 30 min.

Sposób użycia:

Koncentrat przed użyciem należy rozcieńczyć wodą. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Przed pierwszym zastosowaniem preparatu Viruton Strong instrumenty należy umyć czystą wodą, aby nie doszło do kontaktu z innymi środkami. Pozostałości innych substancji w wannie mogą powodować w początkowej fazie stosowania mętnienie roztworu. Nie wpływa to na jakość procesu dezynfekcji, a jedynie na efekt wizualny. W przypadku użycia wody o dużym stopniu twardości na dnie roztworu może pojawić się delikatny osad. Nie zmienia to właściwości wyrobu i nie wpływa na jakość procesu dezynfekcji.

Skład:

100 g zawiera:

- 19,05 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano- 1,3-diamina;
- 5,60 g Poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega -hydroksy-, propanian (sól);
- 2,10 g 2(2- butoksyetoksy)etanol.